

theramagnetic
MR991



MANTIS MR 991

www.mantisrussia.com






MR 991

Имеет регистрационные удостоверения и декларации соответствия Российской Федерации и ЕС



РОСЗДРАВНАДЗОР

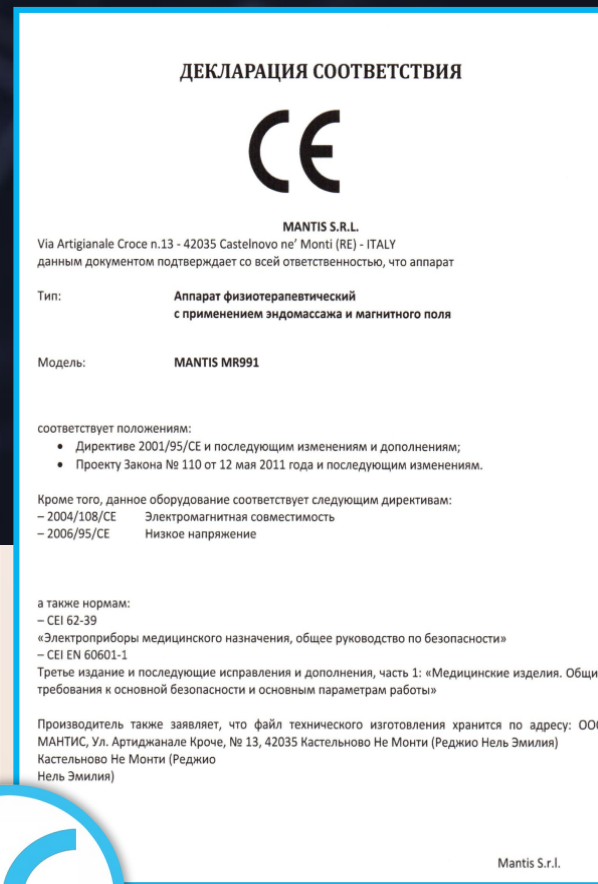

НАМ ДОВЕРЯЮТ:



ФМБА России


Федеральное медико-биологическое агентство

Центры реабилитации
2 этап

Центры реабилитации
3 этап

Центры реабилитации
спортсменов

Санаторно-курортные
центры

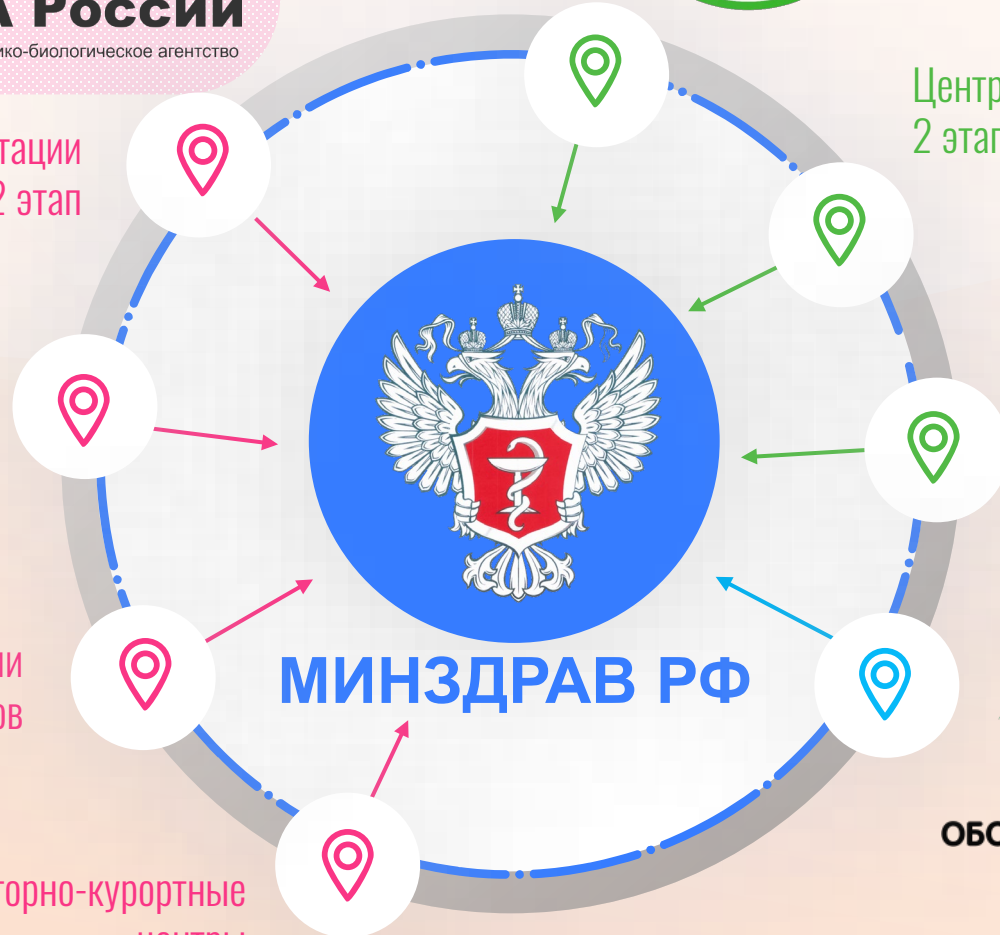

Минздрав Республики Татарстан

Центры реабилитации
2 этап

Центры реабилитации
3 этап



РОСЗДРАВНАДЗОР

БОЛЕЕ 150 АППАРАТОВ УЛУЧШАЮТ ЖИЗНЬ
ЛЮДЕЙ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ

НАШИ КЛИЕНТЫ:



ФМБА России
Федеральное медико-биологическое агентство



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН



WorldClass



КЛИНИКА
ПАРАЦЕЛЬС



САНАТОРИЙ
ОБОЛСУНОВО

САНАТОРИЙ
ДУГИНО



ФГБУ «Российский научный центр
медицинской реабилитации и курортологии»
Минздрава России

Mantis MR 991:

Терамагнит

перезаряжает Ваше тело!


Стохастические
микротоки помогают
успокоить боль
и сбалансировать
циркадные ритмы и
жизненный цикл клетки
продлевая ее жизнь.

theramagnetic
MR991

- посттравматическое изменение суставов, связок, околоуставного аппарата, гематомы, отек, воспаление;
- постбиомеханические изменения, приводящие к смещению центра тяжести от вертикальной оси;
- болевой синдром различного генеза;
- остеохондроз позвоночника; сколиоз I-II степени;
- сахарный диабет, нейропатия;
- лимфодинамические нарушения;
- пастозность верхних и нижних конечностей;
- артериальная гипертензия, заболевания сосудов конечностей;
- синдром "хронической усталости";
- психо-эмоциональные нарушения;
- рубцы, спаечные процессы;
- алиментарное ожирение;
- локальные жировые отложения;
- снижение эластичности тканей;
- увядающая и проблемная кожа, преждевременное старение;
- морщины и мелкие складки кожи лица, шеи и зоны декольте;
- сухая и обезвоженная кожа;
- опущение овала лица и верхних век.

Технология D.E.S. (Dual Energy System)

theramagnetic

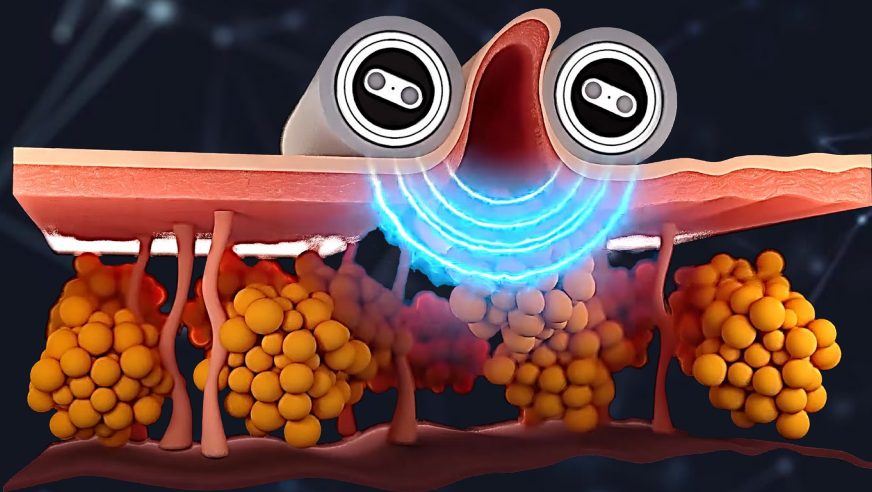


MRM

Механическое воздействие при помощи
МОТОРИЗИРОВАННЫХ РОЛИКОВ

CMPS

Пульсирующее магнитное поле в
СТОХАСТИЧЕСКОМ РЕЗОНАНСЕ

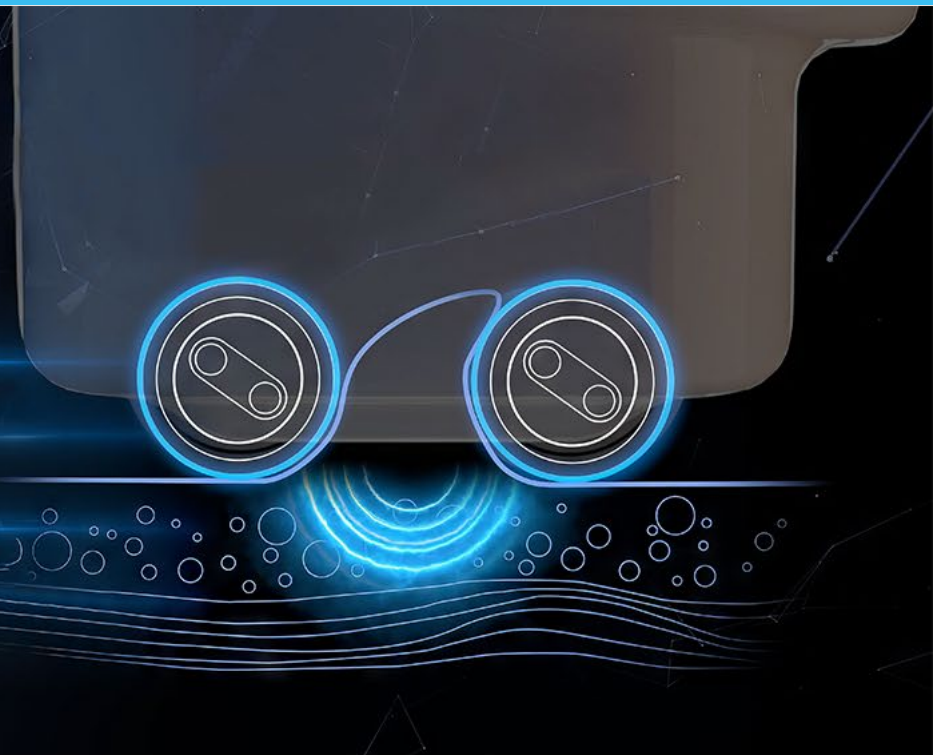

Синхронное действие двумя роликами и импульсным всасыванием


выполняет эффективный эндодермический массаж движением роликов и микроаспирацией, усиливающей механическое воздействие валиков. Представляет собой точное воспроизведение ручного массажа, но с более глубоким и постоянным воздействием. Это особая техника, которая основана на всасывании кожи в сочетании с действием свертывания и разворачивания кожной складки, на которую можно воздействовать с различной силой и частотой в зависимости от эстетического дефекта или физической проблематики.

MRM

Магнитные микротоки в стохастическом резонансе —

переменные магнитные поля, базирующиеся на магнитных полях с высокой энергией, оказывают специфический эффект на ионы, макромолекулы и белки мембраны, увеличивают таким образом обмен кислорода с тканями и способствуют повышению эффективности естественного дренажа токсичных и ненужных более организму веществ во всех органах очищения и переработки, позволяют лечить воспаления опорно-двигательного аппарата. Низкочастотное магнитное поле может существенно изменять скорость перекисного окисления липидов. Это способствует активации трофических процессов в органах и тканях, устраняет инфильтрацию и ускоряет эпителизацию ран.


CMPS

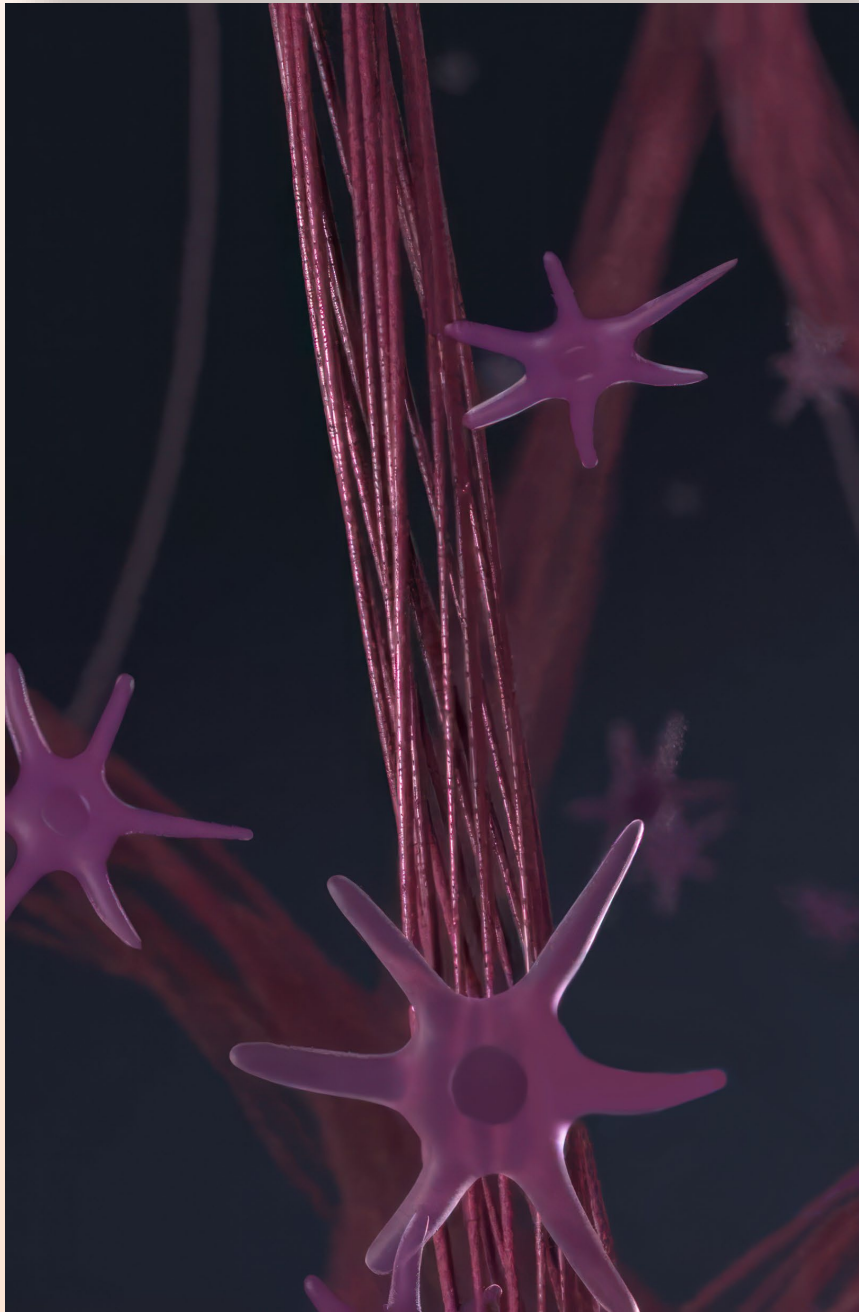

- Действуют на межклеточном мембранном уровне, ведут к восстановлению оптимального производства Аденозинтрифосфата (*ATP - Adenosina Trisfosfato*), молекулы, которая дает приток энергии всем клеточным структурам организма;
- Действуя на уровне органов и анатомических структур приводят к обезболиванию, понижению воспаления, стимуляции к рассасыванию отеков;
- Оказывают особый эффект стимулирования миграции ионов кальция внутри костных тканей, что способствует укреплению костной массы и заживлению переломов;

Способствуют ускорению всех оздоровительных процессов, с явным биорегенерационным, противовоспалительным, противоотечным и обезболивающим воздействием, без побочных эффектов.


Механизмы эффективности применения MantisMR 991 достаточно сложны и основываются не только на мере механического воздействия на поверхностные ткани, но и на более глубоких взаимодействиях с химическими медиаторами, подвижностью и клеточными функциями, распределением потока крови и межклеточной жидкости. Аппарат применим при различных заболеваниях нервной системы, сосудов, опорно-двигательного аппарата, кожи и даже висцеральных органов (например, при запорах). Это делает его актуальным в применении при реабилитации различных групп пациентов.

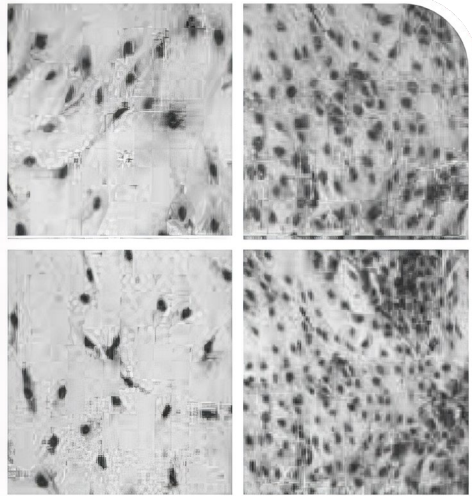

Настоящая стимуляция и пролиферация фибробластов

+52,65%

Исследования, проведенные на людях, прошедших курс лечения показали значительное увеличение (52,65%) пролиферативной активности фибробластов.

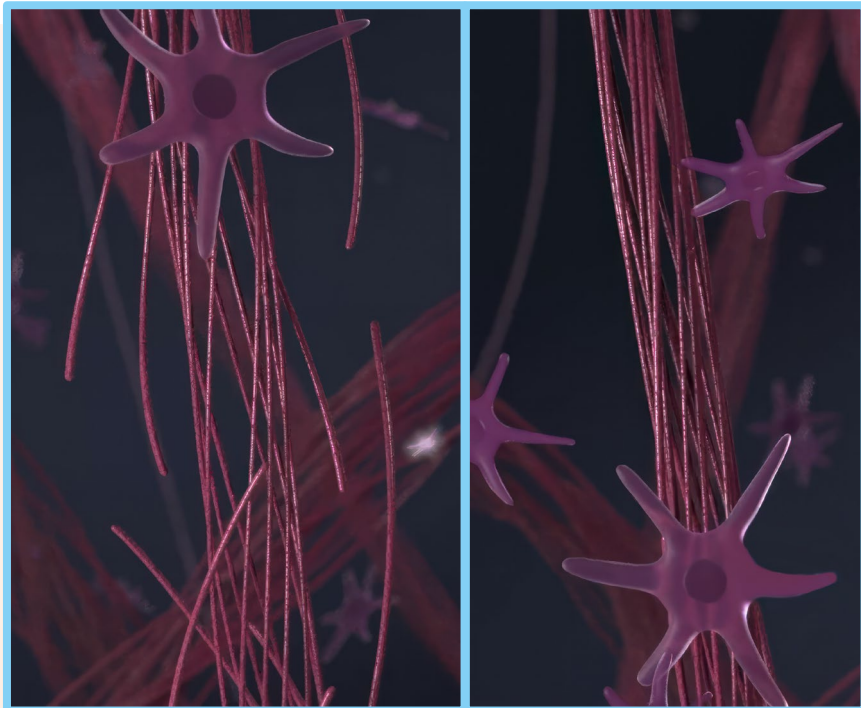

-9,7 cm

Снижение размера талии



Процедуры и контролируемая диета

-5,3 cm

Снижение размера живота



Процедуры

Больше чем 90%

клиентов выразили положительное мнение о результатах процедур, в частности моделирование контуров тела, улучшение кожи, уменьшение признаков старения.

VIXO
MRM + CMPS



MAXI DES
MRM + CMPS



MAXENERGY
CMPS



MINI DES
MRM + CMPS



Сочетание в одной манипуле двух инновационных технологий



Манипула **Maxi DES** идеально сочетает воздействие: **технологии MRM** - обеспечивает глубокий ЭНДОМАССАЖ тканей при помощи роликов и вакуума. И **технологии CMPS** - пульсирующее магнитное поле в стохастическом резонансе

Идеальна для больших участков тела:
ягодицы, бедра и спина

Манипула **Mini DES** обладает теми же характеристиками, что и манипула Maxi DES, но меньшего размера.

Идеально для небольших частей тела:
ноги, руки и живот.




MAXENERGY

CMPS

манипула с магнитным полем
высокой энергии

- Состоит исключительно из установки магнитного поля, активизирует липолитические процессы в жировой ткани, активируя проницаемость мембраны клетки, стимулируя работы Ca^{2+} -каналов, резко сокращает свободные радикалы, оказывая значительное антиоксидантное действие, заметно увеличивает производство гиалуроновой кислоты и производство фибробластов, стимулирует липолитические локализованные ткани
- Укрепляет и повышает эластичность, помогает в лечении рубцов, ожогов и других эстетических и медицинских проблем, также применяется в качестве магнитотерапии заболеваний суставов

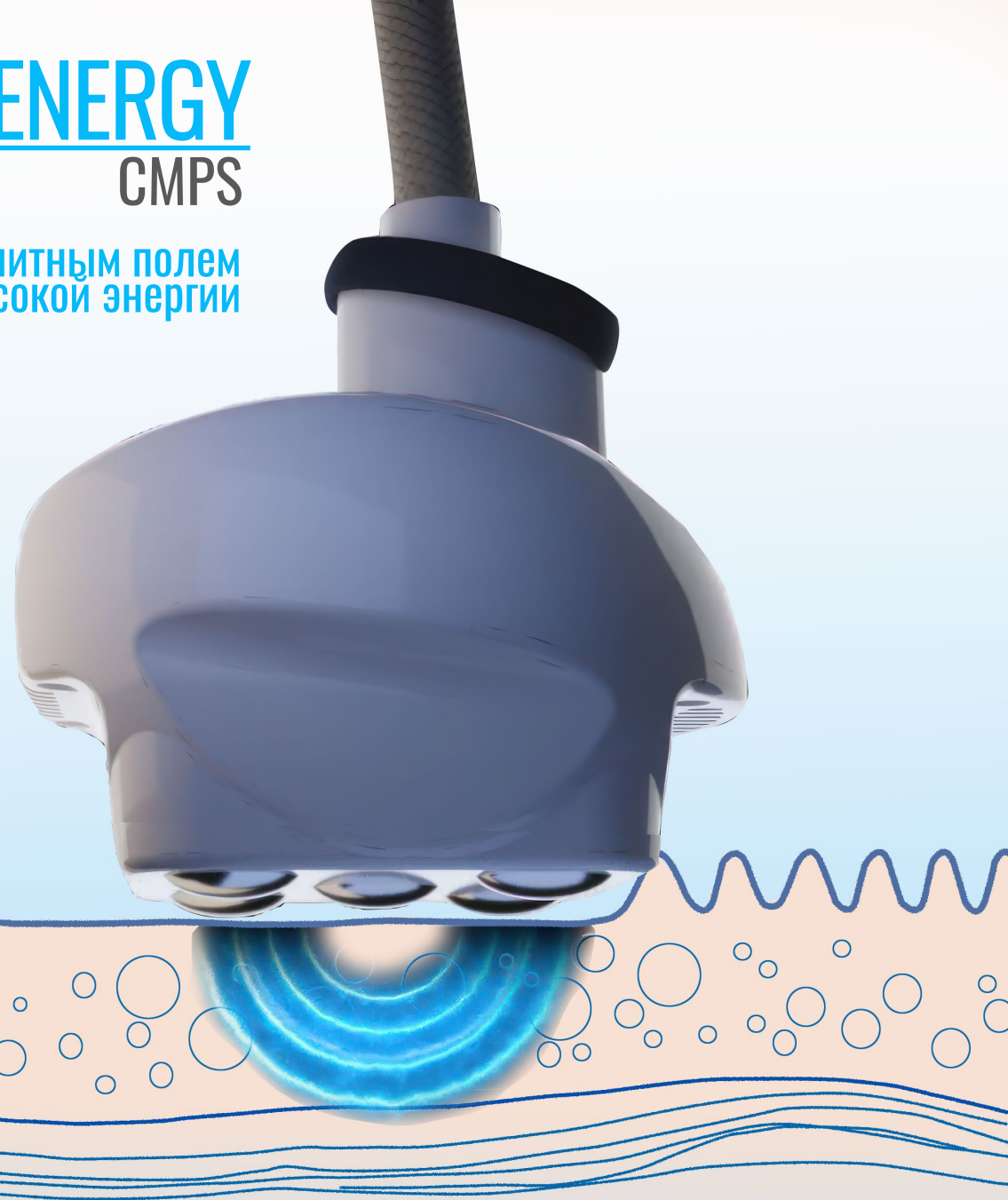


VIXO

Манипула особой калибровки для Anti-age терапии

- Уменьшение мелких и глубоких морщин: лица, шеи, зоны декольте, увлажнение сухой и обезвоженной кожи, восстановление после лазерных процедур и травм, улучшение овала лица и области вокруг глаз, уменьшении розацеи и купероза

MRM + CMPS

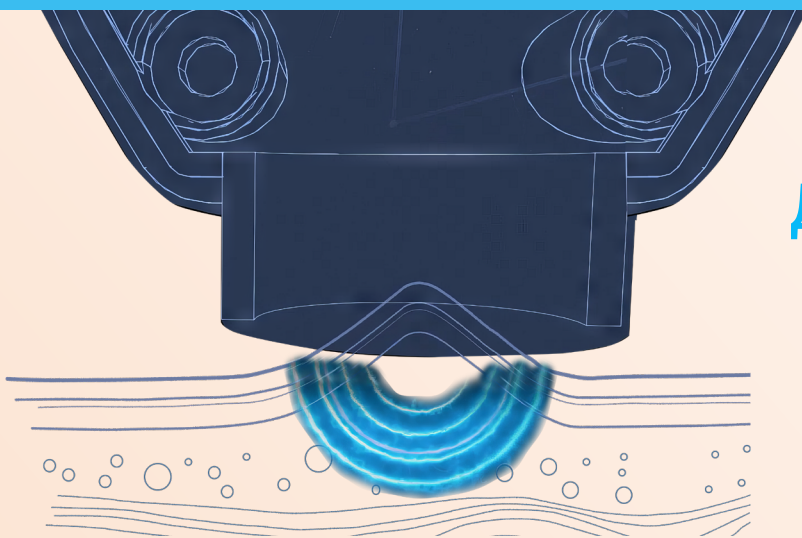

- Точечная анестезия
- Лечение акне и постугревых рубцов

CMPS

сочетание в одной манипуле
двух инновационных технологий



Дренаж

Движения
- выполнять легкие движения

Направления
- поперечные восходящие и нисходящие
- вертикальные восходящие и нисходящие

Положение
- лежа на животе - на спине - на боку

Практика
- выполнять скользящие движения медленно и легко
- следовать горизонтальному восходящему направлению от внутренней поверхности ноги, выполняя, затем, движения по направлению вверх, останавливаясь в подколенной ямке
- вертикальные восходящие движения от подколенной ямки до ягодицы

Продолжительность 25 мин на каждой стороне
Завершить процедуру с использованием манипулы «Maxenergy»

БОЛЬШАЯ МАНИПУЛА Maxі D.E.S. МАЛЕНЬКАЯ МАНИПУЛА Mini D.E.S.

ПРОДОЛЖ-ТЬ ПРОЦЕДУРЫ 25:00

ПАУЗА СТОП СТАРТ

НАЗАД СОХРАНИТЬ USB MANTIS MR 991 06/10/15 12:56

ПРОФ. РЕЖИМ

Н

Endox: только эндомассаж

РОЛИКИ
ИЗМЕНЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ СКОРОСТЬ РОЛИКОВ 70

ВСАСЫВАНИЕ
СИЛА ВСАСЫВАНИЯ 50 ЧАСТОТА ВСАСЫВАНИЯ 20

БОЛЬШАЯ МАНИПУЛА Maxі D.E.S. МАЛЕНЬКАЯ МАНИПУЛА Mini D.E.S.

ПРОДОЛЖ-ТЬ ПРОЦЕДУРЫ 50:00

ПАУЗА СТОП СТАРТ

НАЗАД СОХРАНИТЬ USB MANTIS MR 991 06/10/15 12:57

М

ГРАФИЧЕСКИЙ ИНТЕРФЕЙС ПРОСТ И ПОНЯТЕН

• Меню, команды, индикаторы и символы были разработаны для максимальной простоты использования, ограничивая возможность ошибок со стороны оператора

• Пошаговая инструкция каждого выбранного этапа

• Настройки аппарата могут быть изменены (профессиональный режим работы)
Программы могут быть скорректированы в соответствии с потребностями клиента

• Личный профиль клиента может быть создан и сохранен, что гарантирует индивидуальный подход

Вес (в полном комплекте), 100 кг



1950 мм

600 мм

600 мм

Характеристики

Пиковое значение магнитной индукции на поверхности индукторов излучателей манипулы:

«Maxi D.E.S.»

«Mini D.E.S.»

«Vixò»

«Maxenergy», мТл

Диапазон устанавливаемых временных интервалов процедуры воздействия, мин.

Амплитуда

Диапазон устанавливаемых временных интервалов процедуры воздействия, мин.

Скорость вращения роликов (манипулы «Maxi DES», «Mini DES») регулируется, об/мин

Значение

0,88 ± 5 %

0,75 ± 5 %

85,3 ± 5 %


5,44 ± 5 %

Стохастические импульсы электромагнитного поля в диапазоне от 0,01кГц до 1МГц

Не более 5В

От 1 до 60 мин., интервал установки 1 мин.

От 0 до 74 (в любую сторону)

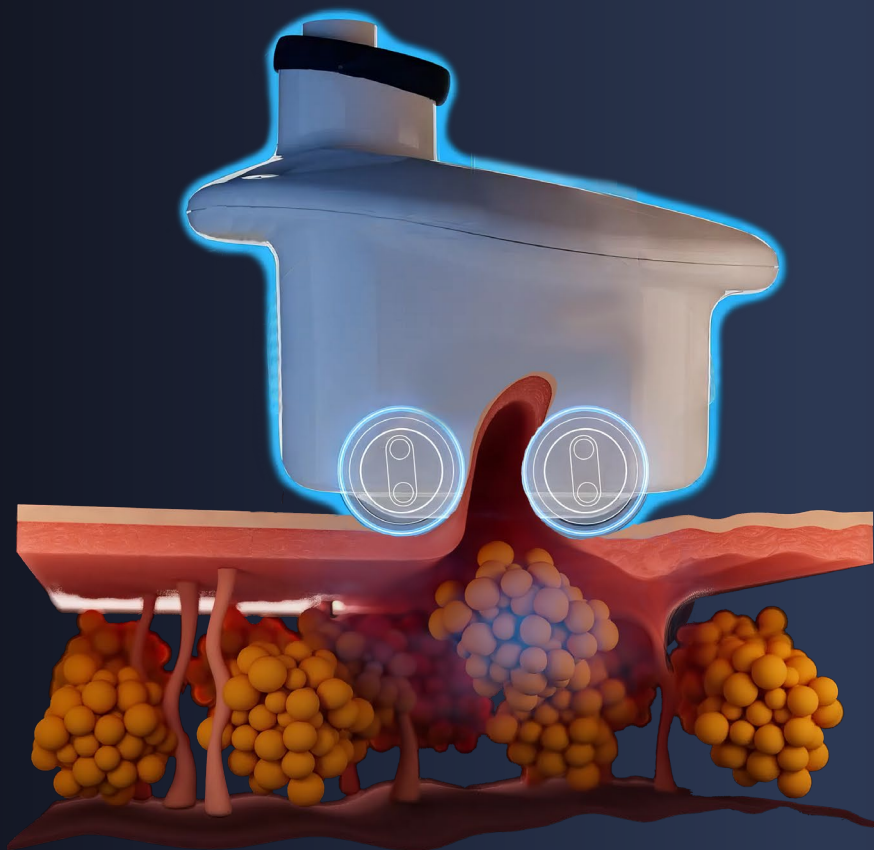

Характеристики

Давление, создаваемое вакуумным насосом, кРа:

Манипула «Maxi D.E.S.»

Манипула «Mini D.E.S.»

Манипула «Vixò»

Погрешность установки давления, %

Электропитание (от сети переменного тока)

Максимальная потребляемая мощность, Вт

Защита от поражения электрическим током

Габариты основного блока (L×P×H)

Вес (в полном комплекте), кг

Класс потенциального риска применения

Значение

От 0 до -55

От 0 до -67

От 0 до -75

± 5 %

220 В ± 10 %, 50 Гц

1200

Класс I, BF

600×600×1950

Не более 100

2a


Какие центры используют MANTIS MR 991 ?



Реабилитационные клиники
2 и 3 этапов реабилитации



Санатории

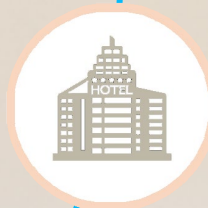

Отели



SPA



Эстетические клиники



Anti-Age клиники

MANTIS
SCIENCE & TECHNOLOGY





Гарантия качества и сервис

Гарантийный срок – 12 месяцев, бесплатно производим диагностику и ремонт в течение гарантийного срока и осуществляем техническую поддержку на протяжении всего срока использования аппарата



Доступность расходных материалов

Низкая стоимость расходных материалов (костюмов)
Компания помогает приобрести костюмы по максимально доступным ценам



Поддержка научной деятельности



Обучение персонала и поддержка

Проводим бесплатное обучение ваших специалистов, наши сертифицированные тренеры оказывают поддержку на протяжении всего срока использования аппарата. Организуем непрерывные образовательные программы по повышению компетенций



theramagnetic
MR991

MR 991

www.mantisrussia.com

Руководитель представительства
Mantis в России:
Михаил Борисов
+7 (915) 245-68-98
M.Borisov@mantisrussia.com

Руководитель проектов
по реабилитации:
Михаил Стоцкий
+7 (964) 799-62-52
m.stotskiy@mantisrussia.com



MANTIS

SCIENCE & TECHNOLOGY



Техническая поддержка:
+7 (985) 649-09-91
support@mantisrussia.com